

# BABA CUSHION Arthrodesenkissen / Bandscheibenkissen

Das BABA Cushion ist ein Medizinprodukt der Klasse I, entwickelt zur Unterstützung einer anatomisch richtigen und entlastenden Sitzposition, sowie zum Ausgleich bei einer eingeschränkten Beckenkipfung bzw. Beckenfehlstellung. Dazu ist der vordere Teil des Kissens abgeschrägt, so dass sich das Bein in einem stumpfen Winkel zum Oberkörper befindet. Es dient zum Ausgleich einer möglichen Fehlhaltung, der Unterstützung einer gesunden, aufrechten Sitzhaltung zur Entlastung der Bandscheiben.

Grundlage des BABA Cushion Arthrodesenkissens ist ein Polyurethanschaum (PU), der einen festen, hohen Sitzkomfort bietet. Gleichzeitig erlaubt der verwendete PU Schaum eine individuelle Ausformung des Gesäßes und des aufliegenden Oberschenkelbereichs.

## Zwecksbestimmung

Das Arthrodesekissen wird verwendet, um das Hüftgelenk und die Wirbelsäule in einer definierten Position zu halten, um die Heilung zu fördern und mögliche Komplikationen wie Instabilität oder Deformitäten zu verhindern.

## Indikationen

Bewegungseinschränkungen der Hüfte  
Arthrotische Veränderung der Hüfte  
Nach Hüftgelenks- oder Oberschenkeloperation  
Bandscheibenprobleme

## Kontraindikationen

Das Arthrodesenkissen ist bei Patienten mit völlig fehlender Eigenbewegungen oder einer Schaumstoffallergie nicht einzusetzen! Bei Patienten mit schweren Sensibilitätsstörungen oder andere Erkrankungen im Aufsitzbereich ist das Arthrodesenkissen nicht einzusetzen; ein direktes Sitzen auf bestehenden Wunden ist zu vermeiden. Das maximale Körpergewicht von 120 kg ist zu beachten.

## Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere BABA CUSHION entschieden haben!  
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, um die optimale und korrekte Nutzung des Sitzkissen zu gewährleisten.


1. Überprüfen Sie vor der Verwendung das Arthrodesenkissen auf eventuelle Beschädigungen (sichtbare Schäden wie Risse, offene Nähte, Verschmutzungen, etc.)
2. Das Arthrodesenkissen verfügt über eine rutschfeste Unterseite mit Silikonbeschichtung. Dadurch bleibt das Kissen während der Nutzung sicher an Ort und Stelle. Überprüfen Sie dennoch regelmäßig, ob das Kissen richtig positioniert ist, um ein mögliches Verrutschen zu vermeiden.
3. Platzieren Sie das Arthrodesenkissen auf einem stabilen Stuhl oder einer anderen Sitzgelegenheit. Achten Sie darauf, dass das Arthrodesenkissen zentriert und richtig positioniert ist, um eine optimale Unterstützung zu gewährleisten.
4. Setzen Sie sich vorsichtig auf das Arthrodesenkissen, indem Sie Ihr Gewicht langsam und gleichmäßig verteilen. Das Kissen ist darauf ausgelegt, eine gerade Sitzhaltung zu fördern und die Belastung auf Hüfte und Wirbelsäule zu reduzieren.
5. Um das Arthrodesenkissen zu reinigen, entfernen Sie den Bezug gemäß den Anweisungen des Herstellers. Waschen Sie den Bezug entweder von Hand oder in der Maschine gemäß den angegebenen Pflegehinweisen. Stellen Sie sicher, dass der Bezug vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder auf das Kissen überziehen. Bitte vor dem ersten Gebrauch den Bezug waschen. Ein evtl. Abfärben auf die Kleidung sollte sich nach dem ersten Waschen verlieren und ist kein Reklamationsgrund. Bitte beachten Sie die weiteren Pflegehinweise unter dem Punkt "Pflege- und "Waschhinweise".
6. Das Arthrodesenkissen ist mit einem Tragegriff ausgestattet, um ein bequemes Handling zu ermöglichen. Verwenden Sie den Griff, um das Kissen sicher und einfach zu transportieren.
7. Bewahren Sie das Arthrodesenkissen an einem sauberen und trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und lagern Sie das Kissen nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen, die es beschädigen könnten.



## Artikel Nr. / Materialien / technische Daten

Artikel Nr. : 20230402  
Abmessung: B x T x H 42 x 42 x 10 cm  
Gewicht: 0,85 kg  
Dichte Schaum: 50 kg / m<sup>3</sup>

Größe: UNIVERSALGRÖSSE  
Max.Körpergewicht: 120 kg

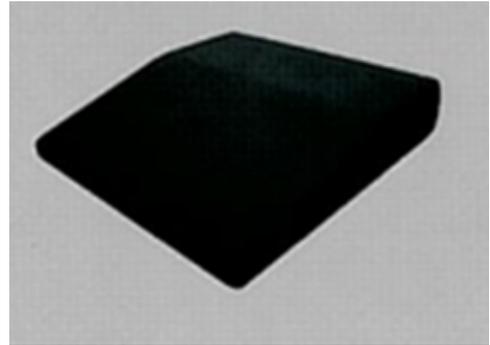

Bezug: 100% Baumwolle / Cotton; EN Stand: EN13688 ÖKOTEX  
Unterseite: rutschfeste Silikonbeschichtung  
Kissenfüllung: 100% Polyurethanschaum

## Pflege- und Waschinweise

Kissenfüllung: mit handelsüblichen Desinfektionsmittel desinfizierbar  
nach dem Reinigen / Desinfizieren das Kissen trocknen lassen  
Abnehmbarer Bezug: Pflegehinweise wie nebenan; siehe ebenfalls auf dem Etikett  
Leichtes ausbluten ist möglich; kein Reklamationsgrund



Bezug separat waschen und auf links drehen, um den Farbton zu erhalten

Das Arthrodesenkissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

Hinweise für Sehbehinderte und Blinde:

Bitte lassen Sie sich die Gebrauchsanweisung vorlesen und durch Fachpersonal in die richtige Handhabung einweisen. Achten Sie unbedingt darauf, dass die gut zu ertastende, silikonbeschichtete Unterseite richtig auf der zu erhöhenden Sitzfläche positioniert ist.

Sie finden die Gebrauchsanleitung auch online auf unserer Homepage.



CE 28.11.2023 /Version 1.5

